



bimedoc

Release note
Bimedoc Expert

Version 1.61.0

Ces notes de mise à jour informent l'utilisateur des nouveautés et améliorations apportées dans Bimedoc Expert 1.61.0, ainsi que des problématiques connues à prendre en considération.

Ceci est un document électronique dont une copie peut être téléchargée à partir de www.bimedoc.com/release-note. Des copies imprimées de la notice d'utilisation et des notes de mise à jour sont disponibles gratuitement à la demande.

Les notes de mise à jour et l'application elle-même sont protégées par des droits d'auteur, et tous les droits sont réservés par Bimedoc. Ni le logiciel, ni la notice d'utilisation ne peuvent être de toute manière copiés ou reproduits sans le consentement préalable écrit de Bimedoc qui se réserve le droit d'y apporter des changements et améliorations au logiciel et au manuel à tout moment.

Bimedoc et le logo Bimedoc sont des marques déposées de Bimedoc.

Les marques tierces utilisées ici sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, qui ne sont pas affiliés avec Bimedoc.

1. Introduction.....	2
2. Documentation associée.....	2
3. Plainte et incidents sérieux.....	3
4. Nouveautés et améliorations.....	3
4.1. Nouvelles fonctionnalités mises en oeuvre dans Bimedoc Expert.....	3
4.2. Problèmes résolus et améliorations mineures dans la version.....	3
5. Problèmes connus.....	4
6. Assistance.....	4

1. Introduction

Ce document contient les notes de version publiques pour Bimedoc Expert. Il fournit une liste des nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des corrections de problèmes depuis la dernière version.

Ce document inclut également des problèmes connus. Chaque utilisateur doit être familier avec ces problèmes connus. Contacter le fabricant pour toutes questions à propos du contenu.

2. Documentation associée

L'ensemble des notes de versions de Bimedoc Expert peuvent être retrouvées ici : www.bimedoc.com/release-note

La notice utilisateur, destiné à assister l'utilisateur dans l'utilisation du logiciel, est disponible à partir du logiciel directement.

Les messages d'avertissement sont énumérés dans la notice d'utilisation . Les messages d'avertissements décrivent clairement les utilisateurs prévus, les limitations dans la plateforme et les risques que peuvent entraîner les changements au logiciel.

3. Plainte et incidents sérieux

Tout dysfonctionnement ou incident en lien avec les dispositifs médicaux doivent être notifiés à l'adresse contact@bimedoc.com.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif médical doit faire l'objet d'une notification de votre part à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel vous êtes établi.

4. Nouveautés et améliorations

4.1. Nouvelles fonctionnalités mises en oeuvre dans Bimedoc Expert

Pas de nouvelle fonctionnalité mise en oeuvre dans cette version

4.2. Problèmes résolus et améliorations mineures dans la version

DDI Predictor - interaction médicamenteuses

Dans le cadre de la présentation d'alternatives thérapeutiques, les bornes ont été modifiées pour être les mêmes que pour la présentation des alertes initial. A savoir lorsque le nouveau rAUC est $\leq 0,67$ (au lieu de 0,5) ou $\geq 1,5$ (au lieu de 2).

DDI Predictor - Cirrhose

Les bornes de déclenchement des alertes ainsi que les bornes de présentation des alternatives thérapeutiques ont été modifiées pour être les mêmes que pour les interactions médicamenteuse. A savoir un rAUC $\leq 0,67$ (au lieu de 0,5) et un rAUC $\geq 1,5$ (au lieu de 2)

DDI Predictor - Cirrhose + interaction médicamenteuse

Les bornes de déclenchement des alertes ainsi que les bornes de présentation des alternatives thérapeutiques ont été modifiées pour être les mêmes que pour les interactions médicamenteuse. A savoir un rAUC $\leq 0,67$ (au lieu de 0,5) et un rAUC $\geq 1,5$ (au lieu de 2)

Correction de la mauvaise qualification pour les substrat prodrogue, le Rauc calculé faisant référence au métabolite actif et non au médicament mère.

Retrait de la proposition d'ajustement posologique.

Les alternatives thérapeutiques qui sont des associations fixes affichent le nom du médicament complet au lieu d'un nom de molécule uniquement

Les alertes DDI + Cirrhose ne prennent plus le dessus sur les alertes DDI cirrhose et les deux s'affichent désormais.

Clarification du message d'alerte pour une meilleure lisibilité par l'utilisateur

Étiquetage

L'étiquette du DM est désormais directement accessible depuis l'interface utilisateur du dispositif médical à l'aide du bandeau bleu sur le bord inférieur de la fenêtre. La notice d'utilisation est téléchargeable directement depuis l'étiquette.

5. Problèmes connus

Il n'y a pas de problème connu relatifs à la sécurité du patient dans Bimedoc Expert.

6. Assistance

Contactez l'une des adresses ci-dessous pour obtenir le service, le support ou si vous avez toutes autres questions.